

OSS-03 STABILIZER TALI 03 - Orteza Stawu Skokowego



Cena :

120,00 zł

Nr katalogowy : **OSS-03**

Producent : **ART-REH**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **wysoki**

Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Orteza stawu skokowego - wykonana z nowoczesnej dzianiny [REDACTED] oraz dzianiny bawełnianej. Charakteryzuje się bardzo dobrym dopasowaniem do stopy pacjenta oraz skuteczną stabilizacją dzięki zastosowaniu podwójnie skrzyżowanych taśm, anatomicznie ukształtowanym usztywnieniom z tworzywa sztucznego oraz sznurowadeł.

WŁAŚCIWOŚCI

1. **Doskonała stabilizacja** - dzięki zastosowaniu usztywnień bocznych, sznurowadeł przednich i taśm w sposób doskonały stabilizuje cały staw skokowy i stopę.
2. **Komfort użytkowania** - dzięki zastosowaniu nowoczesnej dzianiny [REDACTED] i bawełny skóra stopy prawidłowo oddycha i doskonale jest odprowadzany pot z ciała.
3. **Utrzymanie właściwej higieny** - ze względu na łatwość zakładania i zdejmowania ortezy stawu skokowego, pacjent ma możliwość wyprania ortezy, jak również utrzymania właściwej higieny stopy.

PRZEZNACZENIE:

Ortezę można stosować w przypadkach:

- skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego,
- nawykowego zwichnięcia stawu skokowego
- zespoły bólowe stawu skokowego i aparatu więzadłowego,
- doleczenia po unieruchomieniu gipsowym (złamania kości skokowej, piętowej, artrodezy i rekonstrukcje aparatu więzadłowego stawu skokowego)

PRZECIWSKAZANIA:

Ortezy nie należy stosować w przypadku:

- świeżych ran
- otarć naskórka
- egzem skórnych
- alergii skórnych
- nie zastępuje unieruchomienia gipsowego

ZASTOSOWANIE:

Rehabilitacja, ortopedia, reumatologia, neurologia i neurochirurgia.


SPOSÓB ZAKŁADANIA ORTEZY:



INFORMACJE DLA PACJENTA:

1. Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
3. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.
4. W przypadku niewłaściwie dobranego rozmiaru ortozy (zbyt mały rozmiar) może doprowadzić do upośledzenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego stawu, wystąpienia schorzeń skórnych itp.

GRAFICZNY SCHEMAT ZAKŁADANIA ORTEZY:

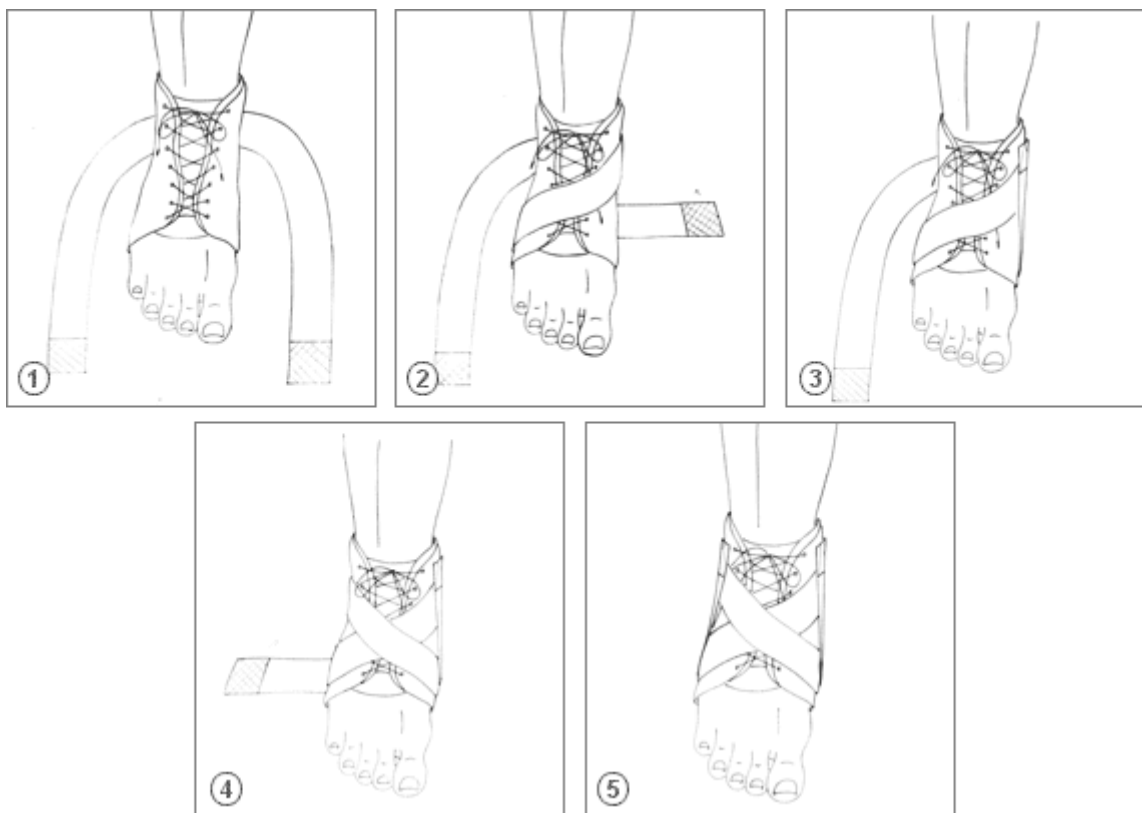

**[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produktu naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)**

**KONSERWACJA:**

1. Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30 stopni.
2. Nie prasować.
3. Nie chlorować.
4. Suszyć z daleka od źródeł ciepła

SKŁAD SUROWCOWY:

dzianina przestrzenna, dzianina bawełniana, pas VELCRO, sznurowadła, usztywnienie poliamidowe

KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka	Przeznaczenie	Odpłatność	Okres używalności	Lekarze Upoważnieni	Limit NFZ
9150.03 Orteza stabilizacyjna staw skokowy	skręcenia i zwichnięcia stawu skokowego, nawykowe zwichnięcia stawu skokowego, stany zapalne, przeciążeniowe aparatu więzadłowego i stawu skokowego.	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	60 zł