

GENUS Z - SHORT - Orteza Stawu Kolanowego



Cena :

51,00 zł

Nr katalogowy : **OSK-Z**

Producent : **ART-REH**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **wysoki**

Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Orteza typu zamkniętego, wykonana z perforowanej pianki neoprenowej, dwustronnie pokrytej tkaniną okładkową. Uzyskano doskonałe odprowadzanie wilgoci na zewnątrz ortezy dzięki zastosowaniu wewnętrznej perforacji, która pozwala również na swobodne oddychanie skóry.

WŁAŚCIWOŚCI

1. **Doskonale odprowadzanie wilgoci na zewnątrz ortezy** - dzięki zastosowaniu wewnętrznej perforacji, która pozwala na swobodne oddychanie skóry.
2. **Częściowe odprowadzanie ciepła od skóry pacjenta** - dzięki zastosowaniu wewnętrznej perforacji, która pozwala na odprowadzanie nadmiaru ciepła.

PRZEZNACZENIE:

Ortezę można stosować w przypadku:

- we wczesnych stanach zwyrodnieniowych (reumatologia),
- nieznacznej niestabilności kolana,
- w późnym okresie rekonwalescencji (rehabilitacja),
- zapobiegania kontuzji u sportowców zwichnięć stawu kolanowego.

PRZECIWSKAZANIA:

Ortezy nie należy stosować w przypadku:

- świeżych ran
- otarć naskórka
- egzem skórnych
- alergii skórnych
- żylakowości
- owrzodzenia podudzia

ZASTOSOWANIE:

Rehabilitacja, ortopedia, reumatologia, neurologia.

SPOSÓB ZAKŁADANIA ORTEZY:



INFORMACJE DLA PACJENTA:

1. Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
3. Nie stosować ortezy, jeżeli wcześniej użyto maści lub żelu rozgrzewającego.
4. Zaleca się stosowanie wyrobu razem z pończochą lub podkolanówką przeciwżylakową o minimalnym stopniu kompresji.
5. Niewłaściwe stosowanie wyrobu lub niewłaściwe dobranie rozmiaru może doprowadzić do upośledzenia krążenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego stawu, wystąpienia schorzeń skórnych itp.
6. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

KONSERWACJA:

1. **Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30 stopni.**
2. Nie prasować.

3. Nie chlorować.
4. Suszyć z daleka od źródeł ciepła.

SKŁAD SUROWCOWY:

Neopren, poliestrowa dzianina okładkowa

KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka	Przeznaczenie	Odpłatność	Okres używalności	Lekarze Upoważnieni	Limit NFZ
9150.23 Orteza rzepki stabilizująca	stabilizacja rzepki, rehabilitacja pourazowa	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	100 zł

**Sposób pomiaru:**

Obwód kolana przy zgięciu ok. 15 st.

Dostępne rozmiary:

S - 30-34 cm

M - 34-38 cm

L - 38-43 cm

XL - 43-48 cm

XXL - 48-53 cm

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produktu naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



[Chcesz za darmo połączyć się telefonicznie z naszym konsultantem](#)
[naciśnij zieloną słuchawkę](#)

Tagi:

[Orteza](#), [Orteza](#), [Stabilizatory Stawu](#), [Stabilizator Stawu](#), [Sklep Medyczny](#), [Sklepy Medyczne](#), [Orteza Stawu Kolanowego](#), [Art-Reh](#)
