

STABILIZER CAPRI ULTRA - Szyna Stabilizująca Dłoń i Przedramię



Cena :

173,61 zł

Nr katalogowy : **SDP-K-01**


Producent : **ART-REH**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena :

CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Korygująca szyna na dłoń i przedramię, wykonana jest z pianki poliuretanowej oraz nowoczesnej dzianiny 

Wnętrze szyny mającej kontakt z kończyną zostało wyścielone specjalnym materiałem, który ze względu na swoją przestrzenną i perforowaną strukturę ma niespotykane właściwości wentylujące, przez co skóra spoczywająca na tej dzianinie jest sucha.

Wyrób wyposażony jest w plastyczną szynę ortopedyczną anatomicznie dopasowaną do kształtu ręki, wykonaną ze stopu aluminium, pokrytą specjalną pianką.

Szyna posiada szerokie pasy wspomagające stabilizację nadgarstka i przedramienia, wyposażone w taśmy VELCRO, dzięki którym istnieje możliwość płynnej ich regulacji. Szyna nadgarstkowa zapewnia doskonale usztywnienie przedramienia i nadgarstka oraz stabilizację dłoni oraz kciuka.

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała stabilizacja** - dzięki zastosowaniu szerokiej plastycznej szyny ortopedycznej uzyskano doskonałą stabilizację wyrobu.
- Komfort użytkowania** - dzięki zastosowaniu specjalnej dzianiny, pot od ciała pacjenta jest skutecznie odprowadzany.
- Łatwość użytkowania** - prosty sposób zakładania i zdejmowania wyrobu przez pacjenta.
- Utrzymanie właściwej higieny** - ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.

PRZEZNACZENIE:

Szynę na dłoń i przedramię należy stosować w przypadkach:

- zwichnięć nadgarstka,
- pęknięć kości śródrečna,
- uszkodzeń i zapaleń ścięgien,
- przykurczy w stawie nadgarstkowym,
- ostrych zespołów bólowych,
- ostrych lub przewlekłych zapaleń kości nadgarstka lub śródrečna,
- innych zabiegów operacyjnych (ortopedia),
- w przypadkach schorzeń neurologicznych pochodzenia centralnego lub obwodowego.

PRZECIWSKAZANIA:

Szyny nie należy stosować w przypadku:

- świeżych ran
- otarć naskórka
- egzem skórnych
- alergii skórnych

ZASTOSOWANIE:

Rehabilitacja, ortopedia, reumatologia, neurologia i neurochirurgia.

SPOSÓB ZAKŁADANIA SZYNY:



INFORMACJE DLA PACJENTA:

1. Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
3. Niewłaściwe stosowanie wyrobu lub zbyt mocne zacisnięcie pasa stabilizującego może doprowadzić do upośledzenia krążenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego

stawu, wystąpienia schorzeń skórnych itp.

4. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

GRAFICZNY SCHEMAT ZAKŁADANIA SZYNY:



KONSERWACJA:

1. Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30 stopni.
2. Nie prasować.
3. Nie chlorować.
4. Suszyć z daleka od źródeł ciepła.

UWAGA: Przed praniem należy wymontować szynę ortopedyczną.

SKŁAD SUROWCOWY:

Dzianina , pianka poliuretanowa, taśma VELCRO, klamerki poliamidowe, szyna ortopedyczna.

KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka	Przeznaczenie	Odpłatność	Okres używalności	Lekarze Upoważnieni	Limit NFZ
9140.13 Łuska na dłoń i przedramię	porażenie i niedowłady mięśniowe zmiany zniekształcające w stawach zmiany pourazowe i pooperacyjne w obrębie nadgarstka i ręki	bezpłatnie do wysokości limitu	raz na trzy lata dysfunkcja stała	ortopeda, chirurg,neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	150 zł
9140.20 Szyna na dłoń i przedramię	porażenie i niedowłady mięśniowe zmiany zniekształcające w stawach zmiany pourazowe i pooperacyjne w obrębie nadgarstka i ręki	bezpłatnie do wysokości limitu	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja stała	ortopeda, chirurg,neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	370 zł
9160.12 Łuska na dłoń i przedramię	porażenie i niedowłady mięśniowe zmiany zniekształcające w stawach zmiany pourazowe i pooperacyjne w obrębie nadgarstka i ręki	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg,neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	150 zł
9160.17 Orteza na dłoń i przedramię	porażenie i niedowłady mięśniowe zmiany zniekształcające w stawach zmiany pourazowe i pooperacyjne w obrębie nadgarstka i ręki	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg,neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	370 zł



Sposób pomiaru:
Obwód nadgarstka

Dostępne rozmiary:

XS - 10-13 cm

S - 13-16 cm

M - 16-19 cm

L - 19-22 cm

PRAWA/LEWA

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



Tagi:

[Ortezy](#), [Orteza](#), [Stabilizatory Stawu](#), [Stabilizator Stawu](#), [Sklep Medyczny](#), [Sklepy Medyczne](#), [Orteza Stawu Nadgarstka](#), [Art-Reh](#)